

Dopřejte si komfort teplých podvodních masáží, relaxujte v obleku!

Hydromasážní systém Wellsystem RELAX Fitness

Relaxační terapie

- Pronásleduje Vás pocit, že jste na pokraji syndromu „vyhoření“?
- Domníváte se, že prevence je lepší než léčba? Chcete aktivovat Váš metabolismus a mobilizovat Váš imunitní systém?
- Trápí Vás bolesti zad nebo jiné chronické neduhy? Potřebujete trvalou fyzioterapii?
- Pracujete často a hodně s počítačem? Toužíte po zklidňujících masážích, které by ulevily Vašemu namáhanému krku, ramenům, střední nebo dolní oblasti zad?
- Prevence ochabnutí svalů.

Přehled funkcí:

- Tlak vodního proudu od 0,5 do 3,75 barů.
- Masáž celého těla.
- Masáž horní poloviny těla.
- Masáž dolní poloviny těla.
- Masáž horní poloviny těla (může být blíže specifikována pro oblast krku a ramen a bederní partie).
- Místní masáž (koncentruje se na oblast 15 cm vybrané oblasti).
- Bodová masáž.
- Pulzní masáž.
- Závěrečná zklidňující masáž (s programovatelnou čipovou kartou).




Vyzkoušejte náš osvědčený systém suchých vodních masáží Wellsystem RELAX - komplexní masážní centrum

WELLSYSTEM RELAX – THE IDEAL COMPLEMENT TO YOUR STUDIO SERVICE



Technická specifikace:

- maximální čas aplikace: 45 min
- tlak: 0,5 až 3,75 bar
- teplota vody: 25 až 40 °C
- rozměry (délka/šířka/výška): 2 150 mm / 1 100 mm / 570 mm
- hmotnost prázdná: 149 kg
- objem náplně vody: 304 l
- maximální el. spotřeba: 2 500 W
220 V – 240 V / -1N / 16 A
- certifikáty: GS, CCA, EMC, CE

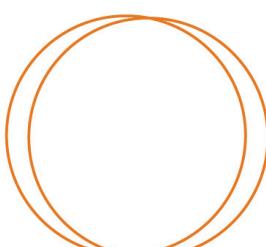

SUCHÉ VODNÍ MASÁŽE SYSTÉMEM WELLSYSTEM RELAX

POUŽITÍ OVLADAČE

Zadejte prosím požadovaný typ masáže a stiskněte tlačítko „Start/Stop“. Typ masáže a tlak vody můžete kdykoli změnit.

1. Masáž celého těla

Při masáži celého těla se trysky pohybují po celé ploše lůžka.

2. Masáž horní poloviny těla

Při masáži horní poloviny těla se trysky pohybují v rozsahu horní poloviny lůžka.

3. Masáž dolní poloviny těla

Při masáži dolní poloviny těla se trysky pohybují v rozsahu dolní poloviny lůžka.

4. Masáž krku/ramen

Masážní trysky se pohybují pouze v rozsahu krku a ramen.

5. Masáž bederní oblasti

Masážní trysky se pohybují pouze v oblasti beder.

6. Bodová masáž

Masážní trysky se nepohybují. Prosím vyčkejte v nastavení „full body massage“, dokud se trysky nedostanou do požadované polohy a pak stiskněte „point massage“.

7. Místní masáž

Masážní trysky se pohybují v rozsahu. Prosím vyčkejte v nastavení „full body massage“, dokud se trysky nedostanou do požadované polohy a pak stiskněte „point massage“.



	25 % = 5 min	
	20 % = 4 min	
	20 % = 4 min	
	15 % = 3 min	
	15 % = 3 min	
	20 % = 4 min	
	20 % = 4 min	

9. Konstantní masáz

Masážní proud tryská nepřerušovaně; vybrané partie pro masáz se nemění.

10. Síla tlaku vody

Síla tlaku vody se může přizpůsobit Vašim potřebám použitím tlačítka „plus“ a „minus“. Nejprve stlačte tlačítko se symbolem síly a pak požadované tlačítko „plus“ nebo „minus“.

11. Indikátor času

Ukazuje času kolik uplynulo pro danou aplikaci. Pro zobrazení času stlačte prosím příslušný symbol.

12. Tlačítko „Start/Stop“


Krátkým stiskem tlačítka „Start/Stop“ přerušíte probíhající; opětovným stiskem program pokračuje. Abyste úplně program ukončili, stlačte a přidržte tlačítko „Start/Stop“ po dobu 3 sekund.

	20 % = 4 min	
	15 % = 3 min	
	15 % = 3 min	
	20 % = 3 min	
	15 % = 3 min	
	20 % = 4 min	

Systém čipové karty

Pro předem stanovené programy je výhodné využít čipovou kartu. Karta se zasouvá do otvoru v horní části ovladače a stiskne se tlačítko „start“ (12). Doba trvání masáže není na kartě naprogramována. To znamená, že musíte zadat požadovanou délku procedury a požadovaný tlak, na panelu ovladače, při zahájení programu. Pro čipovou kartu existují tři různé programy: Medical 1, 2 a 3. Časy zde zadané jsou příklady vztahující se k době masáže v trvání 20 minut. Tlak vodního proudu je možné kdykoli aktuálně přizpůsobit programu uloženému na kartě.

Na konci každého programu uloženého na čipové kartě je naprogramována finální zklidňující masáž probíhající za nízkého tlaku a vysokou rychlostí jednou od hlavy k patě.

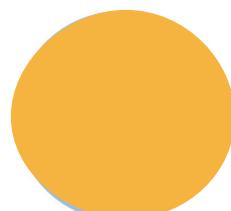

Acare.cz
„v nejlepší péči“

zelená linka : 800 100 690
tel.: 271 197 711, fax.: 271 197 777

